

Trousse de prélèvement de sang capillaire

Tous les tests de laboratoire nécessitent un prélèvement d'échantillon de sang sur le patient pour ensuite l'analyser au laboratoire. Dans certains cas, le temps entre le prélèvement et le test peut être rapide et dans d'autres cas plus long. Ceci est commun pour des tests où l'échantillon est transporté par un service postal.

Pour faire le Test, Laboratoire Daphne utilise un système de prélèvement de sang capillaire avec une trousse à usage domestique. La trousse comprend tout le nécessaire pour le prélèvement.



Vers. 25-09-2017

La stabilité des échantillons de sang entier.

Le tableau suivant indique la stabilité des échantillons de sang entier pour Microarray IgG Food Intolerance Test.

	1 Jour	3 Jour	7 Jour	14 Jour
2°- 8° celsius	✓	✓	✓	✓
23° celsius	✓	✓	✓	✗
37° celsius	✓	✗	✗	✗
45° celsius	✓	✗	✗	✗
-20° celsius	✗	✗	✗	✗

Notes:

Si l'échantillon de sang n'est pas expédié le même jour du prélèvement le conserver dans le frigo jusqu'au moment de l'expédition.