

# Comment faire le Test d'Intolérance Alimentaire IgG


Trouvez ci-dessous les étapes pour recueillir l'échantillon et l'envoyer au laboratoire.



1 Remplir le formulaire de demande.



2 Laver les mains avec de l'eau chaude et sécher.

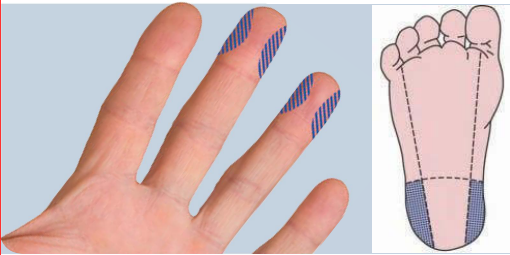

3 Choisir un point sur votre doigt, comme indiqué par la zone ombrée, pour positionner le dispositif

Choisir un point sur le talon, comme indiqué par la zone ombrée, pour positionner le dispositif (pour bébés et enfants)



4 Nettoyer votre doigt avec l'antiseptique.



5 Tourner la languette de protection jusqu'à ce qu'elle se sépare du dispositif.



6 Appuyer la lancette de sécurité fermement sur le point de ponction et presser le bouton déclencheur.


Jeter la Lancette de Sécurité.

**Laboratoire Daphne**


Montreal - Tél: +1 438-995-8093 - [www.laboratoiredaphne.ca](http://www.laboratoiredaphne.ca) - [info@laboratoiredaphne.ca](mailto:info@laboratoiredaphne.ca)

# Comment faire le Test d'Intolérance Alimentaire IgG



Trouvez ci-dessous les étapes pour recueillir l'échantillon et l'envoyer au laboratoire.

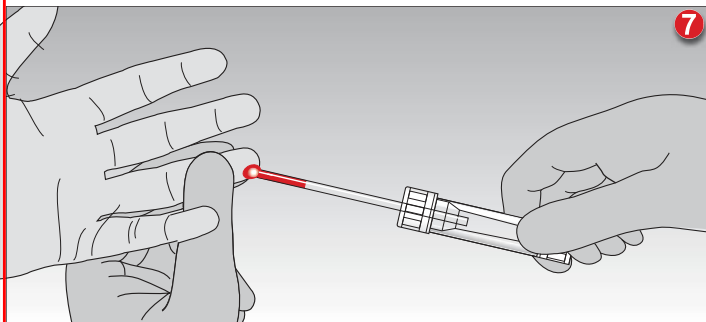

**7** Prélever le sang capillaire avec l'éprouvette. Pour collecter, l'éprouvette doit être maintenue horizontalement ou légèrement inclinée.


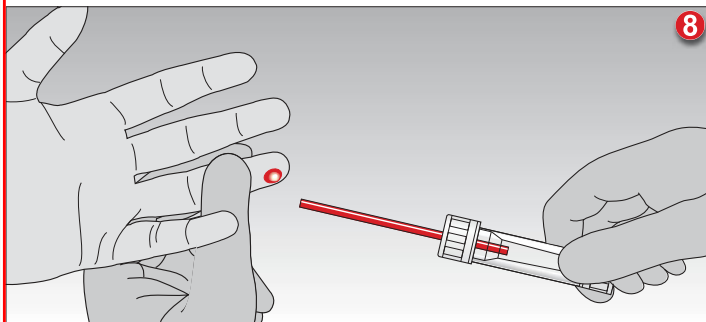


**8** La collection est complète lorsque le capillaire est complètement rempli de sang.

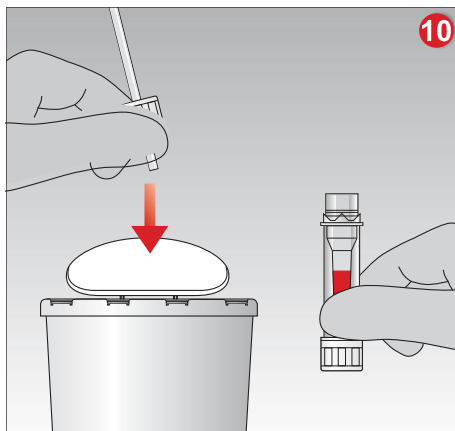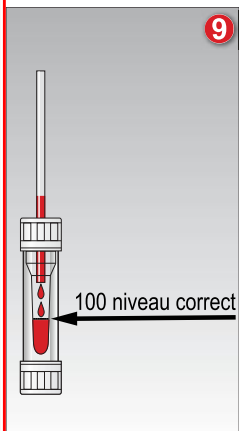

**9** Maintenir le tube droit, pour permettre au sang de s'écouler du capillaire dans l'éprouvette.

**10** Tourner le capuchon pour retirer et jeter le capillaire.

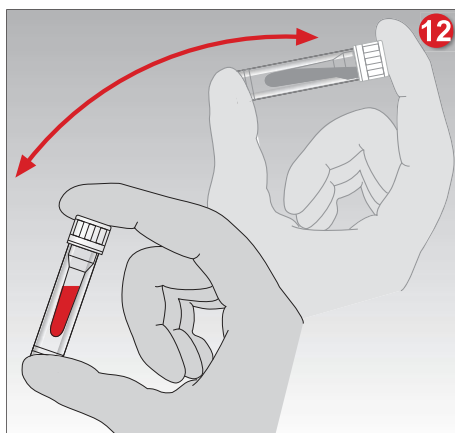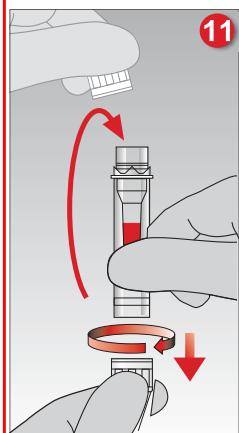

**11** Retirer le capuchon de la base et fermer l'éprouvette (position de clic).

**12** Mélanger l'échantillon de sang, en inversant l'éprouvette.

## Notes:

Si l'échantillon de sang n'est pas expédié le même jour du prélèvement le conserver dans le frigo jusqu'au moment de l'expédition (3 jours au maximum).

Pour les professionnels de la santé: Tous les échantillons de sang doivent être traités avec précautions. Porter des gants!

**Laboratoire Daphne**

Montreal - Tél: +1 438-995-8093 - [www.laboratoiredaphne.ca](http://www.laboratoiredaphne.ca) - [info@laboratoiredaphne.ca](mailto:info@laboratoiredaphne.ca)